



## CHAISES DE DOUCHE



## NOTICE D'UTILISATION ET DE MONTAGE

## INTRODUCTION

Merci d'avoir décidé d'acheter un tabouret de douche d'Aidapt. Ces tabourets de douche sont fabriqués à partir des meilleurs matériaux et composants disponibles. Conçu pour être utilisé correctement, il est conçu pour offrir de nombreuses années d'utilisation fiable et sans problème.

### IMPORTANT!

**N.B. Cet équipement doit être installé par une personne compétente et une évaluation des risques peut être nécessaire pour déterminer si le fauteuil est adapté à l'utilisateur.**

### MODELS AND WEIGHT LIMITS

VB499/VB500	Chaise de douche Milton	127 kg (20 st.)
VB499S/VB500S	Chaise de douche Milton	127 kg (20 st.)
VB501	Chaise de doucheLuton	159 kg (25 st.)
VB648/VB506	Chaise de douche Hythe	190 kg (30 st.)
VB650/VB506A	Chaise de douche réglable Hythe	127 kg (20 st.)
VB507	Chaise de douche Charing	190 kg (30 st.)
VB510	Darenth Chaise de douche	190 kg (30 st.)
VB509	Tabouret de douche Rochester	190 kg (30 st.)
VB508	Tabouret de douche Dartford	190 kg (30 st.)
VB635	Tabouret de douche Strood	159 kg (25 st.)
VB636	Chaise de douche Pembury Corner	159 kg (25 st.)
VB638W	Chaise de douche bariatrique Portland	254 kg (40 st.)
VB639W	Chaise de douche bariatrique Portland avec dossier rembourré	254 kg (40 st.)

**NE PAS dépasser la limite de poids indiquée - cela pourrait mettre l'utilisateur en danger.**

**NE PAS SE TENIR DEBOUT SUR CE PRODUIT.**

## AVANT UTILISATION

Retirez soigneusement tous les emballages. Évitez d'utiliser des couteaux ou d'autres instruments tranchants, car cela pourrait endommager la surface de la chaise. Vérifiez si le produit présente des dommages visibles Si vous constatez un dommage ou suspectez un défaut, n'utilisez pas votre produit, contactez votre fournisseur pour obtenir de l'aide.

## AJUSTEMENT DES PIEDS EXTENSIBLES

Enlevez le clip 'E' du pied de chaise extensible et étirez les quatre pieds de chaise de manière uniforme à la hauteur souhaitée en veillant à ne pas dépasser le dernier trou perforé. (voir fig. 1)

Une fois que vous avez atteint la hauteur désirée, réinstallez le clip «E» en vous assurant qu'il passe bien dans le pied de chaise extensible et qu'il est bien ajusté et positionné. (voir fig. 2).

Ne jamais régler les pieds de chaise extensibles de manière inégale ou inclinée, cela compromettrait la sécurité de l'utilisateur.





## **SOIN ET ENTRETIEN**

Veillez effectuer une vérification de sécurité du produit à intervalles réguliers (au moins tous les 6 mois) ou lors de la réutilisation, ou si vous avez des problèmes.

## **RÉUTILISATION**

Si vous réutilisez ou êtes sur le point de réutiliser ce produit, veuillez vérifier minutieusement la sécurité de tous les composants.

Ceci comprend:

- test PAT pour les objets électriques
- Serrage de tous les écrous / boulons / roulettes
- Autres composants à visser / boulons.
- Vérifiez également la sécurité, les fissures, etc.

sur tous les meubles rembourrés. En cas de doute, veuillez ne pas émettre ni utiliser, mais contactez immédiatement votre fournisseur pour le support technique. Lors de la réémission, une évaluation des risques peut être nécessaire pour déterminer si le fauteuil est adapté à un utilisateur particulier.

## **INFORMATIONS IMPORTANTES**

Les informations contenues dans ce manuel d'instructions ne doivent en aucun cas être considérées comme faisant partie intégrante ou constituant un engagement contractuel ou autre de la part d'Aidapt Bathrooms Limited, de Aidapt (Wales) Ltd ou de ses agents ou de ses filiales. Aucune garantie ni représentation concernant les informations n'est donnée. Veuillez faire preuve de bon sens et ne prenez aucun risque inutile lorsque vous utilisez ce produit. En tant qu'utilisateur, vous devez accepter la responsabilité de la sécurité lors de l'utilisation du produit. N'hésitez pas à contacter la personne qui vous a vendu ce produit ou le fabricant (voir détails ci-dessous) si vous avez des questions concernant l'assemblage / l'utilisation de votre produit.

**Aidapt Bathrooms Ltd.**  
**Z.I. les Ports, Nafine, 82800 NEGREPALISSE, France**  
**Tel: 05 63 48 15 1 Fax: 05 63 37 61**  
**Email: Altai Europe@orange.fr**